

Så här använder du andningsskydd

Kom ihåg att alltid sprita händerna före och efter du hanterar andningsskyddet! Andningsskyddet heter FFP2 eller N95.



Placera masken under hakan och över näsan, fäst bakom öronen



Tryck till masken över näsan och runt kinderna så att den sluter tätt överallt



Testa att masken sitter tätt genom att ta ett djupt andetag, känn så att det sluter tätt. Andas **kraftigt** ut och känn att ingen luft läcker ut längs sidorna



Instruktionsfilm

Det är mycket viktigt att andningsskyddet sluter tätt mot ansiktet. Personer med skägg har svårt att få andningsskydd att sluta tätt, vilket innebär risk för smitta.

Andningsskyddet är engångs, personligt och kasseras efter varje användning.

Andningsskyddet används på samma sätt som munskydd klass IIR hos individer med misstänkt/bekräftad smitta och tillsammans med visir.